



Директор ООО «Биомика»
А.Л. Клевевц

ИНСТРУКЦИЯ по применению средства зоогигиенического «Утеросгель»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Утеросгель

Утеросгель – гель-лубрикант увеличивающий скольжение между трущимися поверхностями при проведении ветеринарных акушерско-диагностических манипуляций.

1.2 По внешнему виду представляет собой однородный гель от светло-желтого до темно-желтого цвета.

Состав: раствор бета каротина водный, масло растительное, живица сосновая, пропиленгликоль, гидроксипропилгуар, ТМ ДЭТА, вода очищенная.

1.3 Утеросгель выпускают расфасованным по 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,5; 1; 5; 10 кг в полимерную тару.

1.4 Утеросгель хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

1.5 Срок годности геля Утеросгель – три года от даты изготовления, при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке.

2 СВОЙСТВА

2.1 Утеросгель представляет собой гель на водной основе, обеспечивающий длительное скольжение и увлажнение. Благодаря нейтральному значению рН не раздражает кожу и слизистые оболочки. После нанесения на обрабатываемую поверхность не высыхает и сохраняет свои качества в течение 15-20 минут на открытом воздухе. Гель совместим с акушерскими перчатками из полиэтилена и латекса. Легко смывается водой.

2.2 По степени воздействия на организм Утеросгель относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Утеросгель применяют для обработки рук ветеринарного специалиста перед манипуляциями (в перчатках и без перчаток), инструментария, датчиков и аналогичного оборудования для лучшего скольжения уменьшения раздражения и травмирования родовых путей при проведении акушерско-диагностических манипуляций, оказании родовспоможения, осеменении скота и исследований УЗИ (ультразвуковые исследования).

При использовании средства его количество определяется ветеринарным специалистом в зависимости от вида манипуляции.

Утеросгель применяют наружно и местно, нанося руками в необходимых количествах и распределяя по всей обрабатываемой поверхности.

3.2 Запрещается применение геля животным при сверхчувствительности к компонентам средства. Утеросгель не обладает побочным действием, за исключением индивидуальной непереносимости. Особенности действия геля не отмечено. Противопоказаний при использовании нет. При индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам геля в месте нанесения может отмечаться слабый зуд. При возникновении устойчивой аллергической реакции рекомендуется симптоматическая и антигистаминная терапия гигиеническими средствами.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

4.2 При случайном попадании геля в организм человека или появлении аллергических реакций следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению косметического средства или этикетку).

5 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

5.1 ООО «Биомика», 210039, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Петруся Бровки, 34/33.

Инструкция разработана сотрудником ООО «Биомика» (Сидорович Д.И).